



|                           |              |                       |
|---------------------------|--------------|-----------------------|
| نام بیمار (گیرنده پیوند): | نام پدر:     | آزمایشگاه ارسال کننده |
| سن و جنس:                 | کد ملی:      | گروه خونی:            |
| نوع بیماری:               | سابقه پیوند: | سابقه دیالیز:         |
| پزشک درخواست کننده:       |              |                       |
| تعداد و تاریخ تزریق خون:  |              |                       |
| آدرس و تلفن بیمار:        |              |                       |

|                |            |                      |
|----------------|------------|----------------------|
| نام دهنده عضو: | نام پدر:   | کد ملی:              |
| سن و جنس:      | گروه خونی: | نسبت دهنده و گیرنده: |
| آدرس و تلفن:   |            |                      |

- نمونه لازم برای بیمار (گیرنده پیوند) حداقل 0.5 سی سی سرم می باشد که در دمای 2-8 درجه سانتی گراد تا 7 روز پایدار است
- نمونه لازم برای فرد دهنده پیوند 6 سی سی خون EDTA دار می باشد (3 عدد لوله CBC) که در دمای 2-8 درجه به مدت 12 ساعت پایدار است
- در صورت امکان ارجح آن است که به جای نمونه خون EDTA دار از نمونه خون دفیبرینه برای دهنده پیوند ارسال شود
- نحوه تهیه خون دفیبرینه بدین صورت است که ابتدا در داخل یک ارلن تعدادی گوی شیشه ای ریخته شود و سپس 10 سی سی خون تام به آرامی به آن اضافه شود و به مدت 15 دقیقه در دور کم روتاتور شود. سپس خون دفیبرینه شده را داخل یک عدد لوله پلاستیکی درب دار (بدون ژل و مواد نگهدارنده) ریخته شود و در تایم ذکر شده ارسال شود
- آزمایشات WBC XM و CDC XM نیازمند نمونه دهنده و گیرنده می باشد ولی آزمایشات CDC PRA و FLOW PRA فقط نیاز به نمونه فرد گیرنده پیوند است

آزمایشگاه ارسال کننده: